

医 04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

シーマン ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔全体図〕

サイズ及び穴の数の違いにより種類が異なる。

例) フェモラルアンギオシート

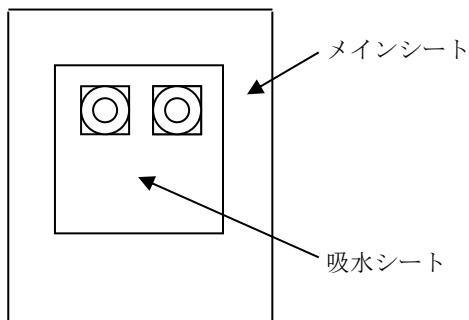

〔人体接触部の組成〕

ドレープ：ポリプロピレン又はポリエチレン

フィルムドレッシング：ポリオレフィン系樹脂

【使用目的又は効果】

手術時に創部を覆う不織布で、いわゆるサージカルドレープである。

【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であり、1 回限りの使用のみで再使用できない。

- 1) 無菌包装に破れ等の損傷又は水ぬれが無いことを確認する。
- 2) 無菌包装を開封し、無菌的に本品を取り出す。
- 3) 本品に損傷が無いことを確認する。
- 4) 消毒した創部を覆う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- 1) 使用前には必ず、滅菌包装に破れ等の損傷又は水ぬれが無いことを確認すること。もし、破れ等の損傷又は水ぬれがあれば使用しないこと。
- 2) 本品を包装から取り出し使用する際には、無菌操作の上使用すること。
- 3) 包装に記載されている「使用期限」までに本品を使用すること。
- 4) 本品を包装から取り出す際は、破損させないように、慎重におこなうこと。
- 5) 本品の使用前には、適切な機能を妨げるような破損箇所、そ

の他欠陥が無いことを確認する。欠陥等を発見した際は、使用しないこと。

- 6) 操作台カバーフィルム附近では生理食塩液を多量に使用しないこと。液漏れによる操作機器故障の原因となることがあります。

2. その他の注意

包装開封後は、直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

本品を保管する時は、次の事項に注意すること。

- 1) 直射日光、水ぬれ、高温多湿な環境を避けて保管すること。
- 2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等を避け、安定した状態で保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。

〔有効期間〕

製品包装に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先：TEL06-7711-6060

〔発売元〕



大阪府北区東天満1丁目12番10号〒530-0044

<http://www.sheeman.co.jp>

TEL. (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。