

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000

## 滅菌不織布ガーゼ

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
体内に留置しないこと

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。
- 2) 使用期限：使用期限は包装に表示。

#### 【形状・構造等】

ビスコース繊維、コットン、ポリエステル繊維又はそれらの複合体からなる不織布。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉  
株式会社メディテックジャパン  
問い合わせ先：TEL06-7711-6060

#### 【使用目的又は効果】

衛生材料（創傷面の保護、血液・体液の吸収、薬剤の塗布等に使用する。）

#### 【使用方法等】

- 1) 滅菌袋を開封し無菌的に取り出す。
- 2) 衛生材料として適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

- 1) ほつれた繊維が体内に残らないように使用すること。
- 2) 損傷や水ぬれがあれば使用しないこと。
- 3) 欠陥を発見した折には使用しないこと。
- 4) 包装を開封後は直ちに使用する。
- 5) 滅菌包装が開封、破損もしくは汚損している場合は滅菌品として使用しないこと。