

医 49 医療用穿刺器
一般医療機器 ガイド 37150000

シリンジホルダーⅡ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

金具がしっかり接合していることを確認の上使用すること

【形状・構造及び原理等】

組成；ステンレス

形状・構造等；寸法

U字溝状金具 縦×横 25×57.2mm

瓢箪型リング 外型 35mm φ

【使用目的又は効果】

注射器の装着することにより、注射部位を片手で抑えながらもう一方の手で自由に注射筒の押し子を出し入れすることによって注射器の操作を容易にしたものである。

【使用方法等】

U字溝状金具を注射筒本体にはめ込み、注射器本体のつばが金属端部の凹型形状の隙間に入るようにセットする。

次に、瓢箪型リングを注射器の押し子の手元のくびれた部分にはめ込む。それぞれの輪の箇所指を入れ押し子を出し入れを行なう。

【使用上の注意】

- 1) 器具がしっかり接合していることを確認の上使用すること。
- 2) 注射器メーカーによっては合わない場合があるので使用前に確認すること。
- 3) 本品の使用中に不具合を感じた場合は使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先：TEL06-7711-6060