

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先：TEL06-7711-6060

【形状・構造及び原理等】

タイプ [®]	1cm 間の条数(本)				1cm × 1cm の条数の 許容誤差	標準幅 (cm)	標準重量 (g)
	経糸		横糸				
	平均	許容 誤差	平均	許容 誤差			
I	12	±1	12	±1	24+2 24-1	30+0.5 30-1.0	幅 30cm 長さ 100cm 10.3±8%

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの臓器の保護のため、外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

- 1) 未滅菌品については、適宜滅菌して使用すること。
- 2) 創傷面には滅菌して使用すること。
- 3) 滅菌は高圧蒸気滅菌又はEOG滅菌をおこなう。

【使用上の注意】

- 1) 体内へ留置しないこと。
- 2) 開封後は早めに使用すること。
- 3) 損傷や水ぬれがあれば使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。