

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用クラスⅠ処置キット 33961001

処置セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- (医療脱脂綿/コットンボール/医療ガーゼ/医療用不織布)
- ・体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

<概要>

本品は、外科手術及び手術前の準備、処置、麻酔、手術後の処置に使用するものであり、迅速な処置及び利便性のため、クラスⅠが最も高い医療機器等を予め組み合わせた単回使用の組合せ医療機器である。

本組合せ医療機器は、以下に示す構成品のうち、2 品目以上を組み合わせた構成である。

<構成品>

(医療機器)

- ・カテーテル被覆・保護剤
- ・救急絆創膏
- ・医療脱脂綿
- ・コットンボール
- ・医療ガーゼ
- ・医療用不織布
- ・汎用サージカルドレープ

(医療機器非該当)

- ・ピンセット
- ・不織布製品
- ・綿棒
- ・スポンジブラシ
- ・止血用圧迫綿
- ・ディスク鉗子
- ・固定用テープ

【使用目的又は効果】

本品は、一般的な処置を迅速に行うために、利便性を鑑みて必要なクラスⅠの被覆保護材を含む医療機器等を予め組み合わせた単回使用のキット製品である。

【使用方法等】

- 1) 滅菌袋を開封し、内容物を無菌的に取り出して使用する。
- 2) 各構成品の操作方法又は使用方法に基づいて使用する。
- 3) 本品はディスポーザブル製品であるので、1 回限りの使用のみで、再使用できない。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装が破損、汚損又は水濡れしている場合には、使用しない。
- ・本品は滅菌済みのため、包装を開封したら直ちに使用する。
- ・開封後、製品の外観上に異常が無い事を確認する。異常のある物は使用しない。
- ・使用する前に、併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認する。

<使用上の注意>

(カテーテル被覆・保護剤/救急絆創膏)

- ・使用中に皮膚がかぶれる場合には使用を停止する。また、皮膚からはがす場合には、傷口に張力がかからない様にゆっくりと注意深くはがす。

<その他の注意>

- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分する。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 本品を保管するときは、次の事項に注意する。
- ・水濡れをさけて保管すること

- ・高温多湿、直射日光、紫外線、オゾン、塩分及び硫黄分を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること
- <有効期間>
- ・包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先：TEL06-7711-6060