

## テクセルニトリルグローブ

## 再使用禁止

【禁忌・禁止】  
再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

写真は製品の一例を示す。



合成素材（ニトリルゴム等）を主材料とする、使い捨て検査・検診用及び歯科用手袋である。指先にエンボス加工が施され、平手タイプの左右兼用。パウダー無し、未滅菌。

## 【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する。

## 【使用方法等】

取り出し口を切り取り、本品を丁寧に取り出して装着する。

## 【使用上の注意】

## 1. 使用注意

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止する。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

## 2. 重要な基本的注意

- 1) 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 2) 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 3) 爪先、刃物等鋭利な部位に触れると、破れたり穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- 4) 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認し使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水濡れに注意し、高温多湿を避けて保管すること。
- ・ 直射日光、人工光源等が当たる場所及び、蛍光灯下やオゾンが発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。
- ・ 使用期限：本品の包装に記載する。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

株式会社メディテックジャパン

問い合わせ先 TEL 06-7711-6060