

\*\*2022年10月（第6版）  
\*2022年2月（第5版）

届出番号：13B1X00180000084

機械器具（29）電気手術器  
一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ（JMDNコード：70657000）  
AARON 電気手術器用アダプタ

**【禁忌・禁止】**

ペースメーカーあるいはその他の電氣的インプラント製品を使用している患者に使用しないこと。  
（併用医療機器）  
併用医療機器に指定された製品以外の医療機器と併用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】**



1)A905EL  
全長：38.0mm  
ハンドピース接続部長：19.1mm



3)A905B  
全長：49.0mm



2)A1255A  
全長：90.0mm



4)A905A  
全長：73.7mm

**【使用目的又は効果】**

AARON900 電気手術器（承認番号：21600BZY00430000）、  
AARON1250 電気手術器（承認番号：21600BZY00427000）の  
本体、医療機器を使用する際、ハンドピース、電極を接続す  
る為に使用するアダプタである。

**【使用方法等】**

1 併用医療機器

AARON900 電気手術器（承認番号：21600BZY00430000）、  
AARON1250 電気手術器（承認番号：21600BZY00427000）の  
本体、医療機器を使用する際、ハンドピース、電極と併用し  
て使用する。

2 使用前

- ① 本製品は未滅菌品であるので、使用に際しては下記条件又は各医療機関により検証され、確立した条件に従って必ず高圧蒸気滅菌してから使用すること。

滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
121℃	30分	30分

但し、2)、4)のアダプタは滅菌しないこと。変形・破損が生じ、使用不能となる恐れがある。

- ② 本製品に折れや被膜の剥がれが無いことを確認する。  
それぞれの接続口にスムーズに差しこめることを確認する。

3 使用方法

- ① A905EL および A905B：ハンドピースと電極を接続する際に使用する。

- ② A1255A：フットスイッチ用ハンドピースを、A1250 電気手術器（承認番号：21600BZY00427000）本体に接続する際に使用する。

- ③ A905A：フットスイッチ用ハンドピースを、A900 電気手術器（承認番号：21600BZY00430000）本体に接続する際に使用する。

**【使用上の注意】**

1 使用前の注意

接続が正確であることを確認すること。

2 重要な基本的注意

電気手術器及び医療機器への接続は正しく行ない、接続端子の金属部分が露出しないよう注意すること。

3 使用後の注意

- ① 取り外しに際しては、本製品の接続部を持ってゆっくりと引き抜くこと。  
② 使用後は次回の使用に支障のないよう水で清拭しておくこと。使用中に汚れた箇所は消毒液で必ず清拭すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

**【保守・点検に係る事項】**

- 1 本製品に付着した血液・薬品等は直ちに清拭すること。  
2 洗浄は酵素系洗浄剤を使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\***

製造販売業者：グンゼメディカル株式会社

電話番号：03-4485-0020

製造業者：Bovie Medical Corporation

ボビーメディカルコーポレーション（アメリカ合衆国）