

添付文書

制定 2017.6.1 (初版)

医療機器届出番号 25B3X10002000001

改定 2021.7.20

医療用品 (4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏

メディベール E

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理】

粘着テープ: ポリウレタンフィルム、アクリル系粘着剤

剥離紙: 紙、シリコーン樹脂

キャリアフィルム: ポリオレフィンフィルム

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護又は支持(傷、皮膚バリアー損傷部位など)

本製品は薄い柔らかなポリウレタンフィルムに医療用の粘着剤を塗布したものです。傷に貼って、外部からの汚れや水分の浸入を防ぎ、傷を保護します。

特徴

1. 薄くてしなやかで皮膚にフィットします。
2. 水蒸気透過性が高く蒸れにくい。
3. 表面にエンボス(凹凸)を形成してありテカリがありません。
4. フィルムの上に化粧して傷を隠すことができます。

【操作方法又は使用方法など】

1. 傷のサイズをみて、それを被覆する余裕のサイズのものを選択する。
2. 傷口及び周囲の皮膚を含め、流水又は生理食塩水で良く洗浄し、傷の周囲の水分はきれいにふき取る。
3. 製品を剥離紙(台紙)から、→印または突起部分を持って剥がし、傷が中央部にくるように覆い、傷周囲に貼りつける。
4. →印部分の下剥離紙の小片を取り除いて、全面を皮膚に貼りつける。円形の場合

合は突起部分を 90 度に折り曲げたのちねじるようにして取ってください。

5. 黒マークの部分から、キャリアーを剥がし、円形の場合は尻尾の部分を持ってキャリアーを剥がし、
6. テープの周囲を良く押さえ密着させる。

【使用上の注意】

1. 化膿している傷や、虫刺され、噛み傷には使わないでください。
2. 1 度使ったものを再使用しないでください。
3. 浸出液が漏れたり、テープが汚れたり、剥がれかけたら、直ちに新しいものに貼り替えてください。
4. 1 日に 1 回程度の貼り替えを目安としてください。
5. 熱感、貼れ、痛み、傷周囲の赤みなどが現れたら感染している可能性がありますから、専門医に相談してください。
6. 使用中発疹、発赤、かゆみなどが生じた場合は使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。
7. 乳幼児には使用しないでください。
8. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
9. 清潔に保管してください。

【貯蔵方法及び有効期間】

直射日光は避け、涼しいところに保管してください。

【包装】

	メディベール E CT15	メディベール E CT16	メディベール E CT22	メディベール E CT55
サイズ	15 mm円型	15 x 40 mm	22 x 70 mm	55 x 75 mm
入数	12 枚	12 枚	10 枚	5 枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 株式会社メディカルフロント

〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 立命館大学 BKC インキュベータ

製造業者：アイ株式会社

〒569-0043 大阪府高槻市竹ノ内町 69 番 2 号

お問い合わせ先 ☎077-599-1702 受付時間 9 時～17 時（土、日曜、祝日は除く）