

添付文書

2020年6月17日（初版）

医療機器届出番号 25B3X10002000004

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏

## メディベール G（愛称 肌レーヌ）

### 再使用禁止

---

禁忌・禁止

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理】

粘着テープ：ポリウレタンフィルム、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコーン樹脂

キャリアーフィルム：ポリオレフィンフィルム

### 【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護又は支持（傷、皮膚バリアー損傷部位など）

### 【操作方法又は使用方法など】

1. 傷のサイズをみて、それを被覆する余裕のサイズのものを選択する。
2. 傷口及び周囲の皮膚を含め、流水又は生理食塩水で良く洗浄し、傷の周囲の水分はきれいにふき取る。
3. 製品を剥離紙（台紙）から剥がし、傷がテープの中央部にくるように覆い、傷周囲に貼りつける。指に巻く場合は半分まで巻いて、表面の保護フィルムを半分剥がし剥がした上に巻き付ける。その後、残っている保護フィルムを取り除く。
4. テープの周囲を良く押さえ密着させる。

### 【使用上の注意】

1. 化膿している傷や、虫刺され、噛み傷には使わないでください。
2. 1度使ったものを再使用しないでください。
3. 浸出液が漏れたり、テープが汚れたり、剥がれかけたら、直ちに新しいものに貼り替えてください。
4. 1日に1回程度の貼り替えを目安としてください。
5. 熱感、貼れ、痛み、傷周囲の赤みなどが現れたら感染している可能性があります

から、専門医に相談してください。

6. 使用中発疹、発赤、かゆみなどが生じた場合は使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。

**【貯蔵方法及び有効期間】**

- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管してください。

**【包装】**

60mmX75mm 10枚入小箱包装

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者： 株式会社メディカルフロント

〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 立命館大学 BKC インキュベータ

製造業者： アイ株式会社

〒569-0043 大阪府高槻市竹ノ内町 69 番 2 号

お問い合わせ先 ☎077-599-1702 受付時間 9 時～17 時（土、日曜、祝日は除く）