

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000
(救急絆創膏 34864000)

ミポア

再使用禁止

【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。
(感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。)

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

** 1. 構造

本品は、吸水性パッド及び不織布から成る粘着剤が付与された創傷被覆・保護材である。

** 2. 形状、寸法

製品番号	サイズ	入り数
670800	6×7cm	60枚/箱
670900	9×10cm	50枚/箱
671000	9×15cm	50枚/箱
671100	9×20cm	30枚/箱
671200	9×25cm	30枚/箱
671300	9×30cm	30枚/箱

3. 原理

本品は、滲出液の少ない創部を被覆する。撥水性を有し、創部を保護する。過度に粘着せず、柔軟性があり、身体のどの部位にも用いることができる。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

身体の部位に用いる、接着剤を付した布製又はプラスチック製等の各種形状の絆創膏材をいう。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

** 【使用方法等】

** 1. 前処置

(1) 創傷部を必要に応じて消毒後、生理食塩液等で洗浄し、創傷部の周囲を十分に乾燥させる。本品の交換を行う場合も同様である。

** 2. 使用方法

(1) 創傷の大きさに応じ、創傷部の周囲を十分に覆うことが出来る適切な製品サイズを選ぶ。
(2) 本品の剥離紙を剥がす。
(3) 本品を創傷部・穿刺部に押し付け、完全に密着させる。
(4) 本品を除去する際は、一角をそっと持ち上げ、ゆっくりと剥がす。

** 3. 交換時期

(1) 本品は、創傷部とその周辺皮膚の状態、または治療方針に従って適宜交換する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ** (2) 本品の使用中は、感染の兆候に十分注意すること。また、患者の全身状態の悪化、全身管理の不足等によっても、創傷部に感染症状が現れることがある。
- ** (3) 創周辺部に粘着剤による発赤や滲出液の貯留による浸軟が起こる場合がある。また、皮膚剥離を起こす場合もあるので、本品の使用時には十分な観察を行い、本品の関与が否定できない異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談し適切な治療を行うこと。

2. その他の注意

- (1) 本品は滅菌済みで、包装に破損等がない限り無菌性は保証されるが、使用前に包装が破損又は汚損している場合には使用しないこと。
- (2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- (3) 本品は再滅菌しないこと。

** 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。使用期限は包装に記載（自己認証による）。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社
電話：03-6914-5004