

機械器具 (25) 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ JMDN:32692000
ドクター스코ープ (TTL 型)

【禁忌・禁止】

眼球に有害な影響を与える恐れがあるので、直接太陽や強い光を見ないこと。

【形状、構造及び原理】

本品の形状・構造は次のとおり。



1)フレーム 2)テンプルアーム 3)キャリアレンズ
4)ノーズパッド 5)ループ

【原理】

本品は、対物レンズで遠方の物体の像を得、これを接眼レンズで拡大する。これにより術者は作業野の拡大像を得る。

【使用目的、効能又は効果】

本品は外科処置時に作業野の拡大像を得るために用いる。

【性能及び安全性に関する規格】

本品はフレームについて 6 種類、ループについてその倍率に従って 5 種類がある。

1.ループ性能

倍率	視野 (mm)	解像度	焦点深度 (mm)	作業距離
×2.5	140@400	33 IP/mm ² 以上	200@400	注文に 応じて作製
×3.0	130@400	33 IP/mm ² 以上	110@400	
×3.3	60@400	35 IP/mm ² 以上	50@400	
×3.8	70@400	36 IP/mm ² 以上	50@400	
×5.0	60@400	36 IP/mm ² 以上	30@400	



2.フレーム

フレームは 6 種類がありそれぞれ次のカラータイプがある。

フレーム	カラー
RD-1	ブラック、ブルー、シルバー、ワイン、バイオレット
RD-2	ブラック、ブルー、グレー、ガンメタ/ゴールド
WD-3	ブラック、ワイン、ライトグリーン
ED-1	ブラック、ブルー、カーキ
ED-2	ブラック、ワイン、カーキ
ゴーグル	ブラック、シルバー、レッド、他

【使用方法】

1. 各部に緩みがないことを確認する。
2. レンズを確認し、異物が付着している場合はクリーナーで完全に拭き取る。
3. 滑り落ちを防ぐために、フレームにテンプルアームの紐を取りつける。
4. 市販の眼鏡と同じ要領で装着する。
5. レンズの位置を適切な視野が得られるよう調整する。
6. ノーズパッドでレンズが瞳孔の中心部に来るよう調整する。
7. フレームレッグで頭部への固定の緩みを調整する。
8. 適正な視野が得られることを確認し、作業を行う。

・本品は「販売名：ドクター스코ープ LED ライト 届出番号：40B1X10013000001」と併用して使用することができます。

【使用上の注意】

- ・眼球に有害な影響を与える恐れがあるので、直接太陽や強い光を見ないこと。
- ・使用前に、破損、傷、腐食等がないか確認する。
- ・使用中、移動時、保管時には乱暴に扱わず衝撃を与えない。
- ・水を使ってループを拭き取らず、また水の中にも入れないこと。

【保管上の注意】

- ・本品を収納箱に収納し、塵芥、振動を避けて保管すること。
- ・専門家以外は、ループを分解、修理しないこと。
- ・本品を、湿気、ガス、酸、アルカリなどの腐食性物質の近くで保管しないこと。

【包装】

1 箱 1 セット



【製造販売業者及び製造業者の氏名・名称及び住所】

製造販売業者：株式会社メディカルインクス
福岡県大野城市川久保 1-17-13
TEL:092-513-0050

製造業者：MINAM OPTICS (大韓民国)