

器 11 放射線障害防護用具
一般医療機器 放射線防護用手袋 (38364000)

メディカルイングス 滅菌済ラディエーション プロテクショングローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者及び患者への使用は禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 概要

本品は、術者及び患者の手を放射線被ばくから保護するために使用する、天然ゴムラテックス（NRL）を原料とした単回使用の滅菌済放射線防護手袋である

型式	厚さ
A10	0.1～0.3 mm
A30	0.3～0.4 mm



サイズ	幅(W)	最小全長(L)
6	77 ± 5 mm	260 mm
6.5	83 ± 5 mm	260 mm
7	89 ± 5 mm	270 mm
7.5	95 ± 5 mm	270 mm
8	102 ± 6 mm	270 mm
8.5	108 ± 6 mm	280 mm
9	114 ± 6 mm	280 mm

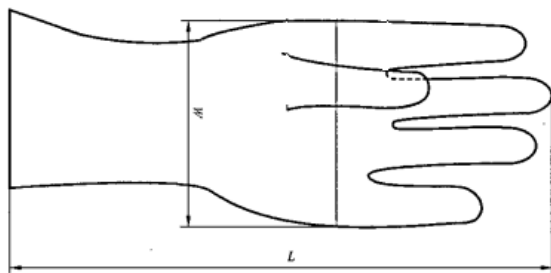

【使用目的・又は効果】

医療現場において術者及び患者の手や指を不必要な放射線被ばくから保護する為に使用する。

【使用方法】

- ① 包装を開封し手袋を取り出す。
- ② 無菌的に手に装着して使用する。

【使用上の注意】

- ① 包装に破損やピンホールがないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- ② 本品は医療放射線装置より透過・散乱する散乱放射線からの手を保護を目的として使用される。一時放射線被ばくからの保護には使用しないこと。
- ③ 使用中に破れたり穴が開いたりした場合は手を洗浄、消毒し、新しい物に交換すること。

- ④ 本品は単回使用滅菌済手袋なので、再使用しないこと。
- ⑤ パウダー付き手袋は使用前に表面のパウダーを無菌状態で除去すること。
- ⑥ 天然ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー症状にはⅠ型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるたん白による）、Ⅳ型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ① 高温や水漏れを避けて保管すること。
- ② 通気性の良い涼しく乾燥した場所(30℃以下、湿度80%以下)で、床から100mm以上離して保管すること。直射日光、紫外線照射、オゾンを避けること。
- ③ 油、酸、アルカリ、銅、マンガン等、ゴム製品に害になる物質から遠ざけること。

2. 有効期限

使用期限は包装上に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メディカルイングス
福岡県大野城市川久保 1-17-13
TEL:092-513-0050

外国製造業者：Suzhou Colourway New Material Co., Ltd.

国名：中国