

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用手袋(JMDN：38364000)

再使用禁止

イングス SAFE HAND

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者及び患者への使用は禁止

**【形状、構造及び原理等】

サイズ	掌部幅 (mm)	全長 (mm)
6	80	260
6.5	85	260
7	90	270
7.5	95	270
8	100	270
8.5	105	280
9	110	280

※寸法許容範囲 ±5mm



【使用目的又は効果】

術者や他の要員の手の全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から保護するために使用する個人用の保護装置をいう。

【使用方法等】

- 包装を開封し手袋を取り出す。
- 無菌的に手に装着して使用する。

【使用上の注意】

- 包装に破損やピンホールがないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用中に破れたり穴が開いたりした場合は手を洗浄、消毒し新しいものに交換すること。
- 本品は単回使用滅菌済手袋なので、再使用しないこと。
- 本品は天然ゴムを使用している。天然ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 水のかかる場所に保管しないこと。
- 化学物質との接触を避け保管すること。

有効期間

- 包装に記載した有効期間参照。（自己認証による）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社メディカルイングス
福岡県大野城市川久保 1-17-13
TEL 092-513-0050

製造業者：GUANGZHOU NEWLIFE MAGNETICS
CO., LTD.
(中華人民共和国)