

2010年12月4日作成（第1版）

届出番号：34B3X100060000203

歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨材（70907000）

## ホワイトコーンⅡシャトル

### 【形状、構造及び原理等】

形状：砲弾形（断面：砲弾形）

構造及び原理等：アルミナの粒子を接着させた紙を砲弾状に巻いた研磨材

### 【使用目的、効能又は効果】

歯科補綴物等（主として金属レジン床）の研磨に用いる器材

### 【操作方法又は使用方法など】

専用マンドレルを確実に装着されたか確認し歯科技工用回転機器にハンドピースを装着し回転させてソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

### 【使用上の注意】

- 1.本材は適正使用（8,000rpm以下）を超えて使用しないこと
- 2.本材は長時間連続で使用すると熱を帯びることがあるので断続的に使用するように注意すること
- 3.本材は無理な角度、過度の加圧での使用は避ける
- 4.研磨物等の微粉が目、口等に入らないように保護メガネ、マスクなどを着用の上作業を行うこと

### 【貯蔵、保管方法及び使用期間等】

湿気をさけて保管すること

### 【包装】

ホワイトコーンⅡシャトル 1箱（100個入り）

ホワイトコーンⅡシャトル 1箱（50個入り）

### 【製造販売業者及び製造業者の名前又は名称及び住所等】

製造販売元：メディカル技研株式会社

住所：〒731-0103 広島市安佐南区緑井二丁目 27 番 20-6 号

電話番号：082-877-0047

製造業者：メディカル技研株式会社