

Viscoネーザルパッキング

再使用禁止

【警告】

- ・使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。[期待する性能が得られない恐れ]
- ・保存中は室温（1～30℃）に注意し、包装紙に密封されているか確認してから使用すること。[期待する性能が得られない恐れ]
- ・包装から取り出した製品は、そのまま放置せずできるだけ早く使用すること。[滅菌効果が損なわれる恐れ]
- ・使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。
- ・本品は使い捨て製品です。再滅菌あるいは再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

Viscoネーザルパッキングは、非常に吸収性の高いガーゼ芯を使用しています。

又独特のセル構造により強靭さと耐久性に優れ、患者に不快感を与えないような柔軟性を持っています。

外観



標準型パッキング

モデル番号	仕様	内容	
201701	長さ 4.5cm 厚さ 1.5cm **幅 2.0cm	10-20 パケット／箱	1／パケット
201702	長さ 8.0cm 厚さ 1.5cm 幅 2.0cm	10-20 パケット／箱	

鼻血用パッキング

モデル番号	仕様	内容	
201703	長さ 5.5cm 厚さ 1.5cm 幅 2.5cm	10-20 パケット／箱	1／パケット
201704	長さ 10.0cm 厚さ 1.5cm 幅 2.5cm	10-20 パケット／箱	

**副鼻腔用パッキング

モデル番号	仕様	内容	
201706	** 長さ 2.5cm 厚さ 0.6cm 幅 2.0cm	10-20 パケット／箱	2／パケット
201707	** 長さ 2.5cm 厚さ 0.9cm 幅 2.0cm	10-20 パケット／箱	
201708	長さ 2.5cm 厚さ 1.2cm 幅 2.0cm	10-20 パケット／箱	

201709	** 長さ 3.5cm 厚さ 0.6cm 幅 1.2cm	10-20 パケット／箱	
201710	** 長さ 3.5cm 厚さ 0.9cm 幅 1.2cm	10-20 パケット／箱	
201711	長さ 3.5cm 厚さ 1.2cm 幅 1.2cm	10-20 パケット／箱	

【使用目的又は効果】

使用目的

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とします。

抗生物質を患部に供給するためにも使用できます。

効果

- ・滲出する血液、体液を迅速に吸収して器官を保護し、汚染を防ぎます。
- ・薄い構造なので取り扱いやすく視認性を妨げません。
- ・表面がなめらかなので長く使っても癒着が少なく、経済的です。
- ・サイズの種類が多いので、大きなスポンジを切る手間が省けます。
- ・非繊維材なので、残留物がありません。
- ・溶剤（精製水）：0.08g

【使用方法等】

使用方法

鼻の外科手術の際、患部からの出血や体液の滲出を防ぐために、本品を患部に付着させて、血液や体液を本品に吸収させた後取り除きます。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

包装紙に密封された状態で、室温（1～30℃）で保存します。

耐用期間・使用期間

包装紙に記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：GEMSS JAPAN 株式会社

住所：大阪府大阪市淀川区西中島六丁目3番32号

電話：06-6476-7145

FAX：06-6476-7146

製造業者名：SOMYOUNG MEDICS