

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 排液バック 70308000

# メリット ディスポーザル デュポット

## 再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

#### 使用方法

再使用禁止、再滅菌禁止

2. 本品に破損や不具合がないかを確認する。
3. ルアコネクタにドレインチューブ等の末端を確実に接続する。
4. 本品を患者より低い位置にあるように設置し、排液を貯留させる。
5. 使用後はドレインチューブ等との接続を外す。

### 【形状・構造及び原理等】

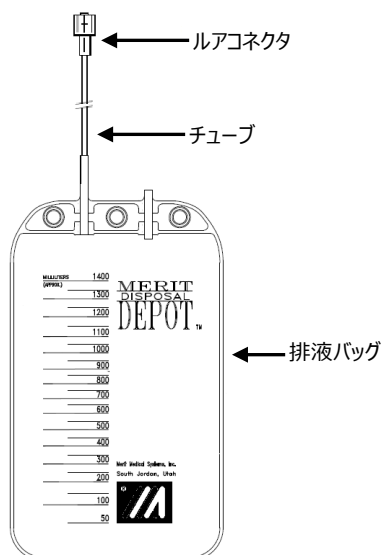

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品を吊り下げる場合は、落下の恐れのない方法で、患者体位より低い位置に吊り下げる。[排液が逆流する恐れがある。]
2. 使用中は排液の逆流や詰まりに十分注意する。
3. バッグ方面に印刷された目盛りは目安である。目盛と実際の排液量はバッグの使用状態により異なる。
4. 外から衝撃や圧力を加えない[漏れの原因となる恐れがある。]

#### 【使用上の注意】

##### <重要な基本的注意>

1. 本品に併用する医療機器を接続する場合は、確実に嵌合するものを選択する。また、使用中はドレインチューブ等との接続部分に漏れや緩みがないか適宜確認する。
2. 界面活性剤又はエタノール等をコネクタに接触させないこと。[ひび割れの原因となる恐れがある。]
3. 本品を鉗子等で強く挟まない。

#### <不具合・有害事象>

その他の不具合

- ・製品の破損及び漏れ
- ・チューブ接続部の外れ及び漏れ
- ・各部の閉塞

#### <形状>

| カタログ番号 | 容量     | 仕様        |
|--------|--------|-----------|
| MDD100 | 1400mL | オスルアコネクタ付 |
| MDD110 | 1400mL | メスルアコネクタ付 |

#### <原理>

本品のルアコネクタにドレインチューブ又はカテーテルを接続し、自然落下により血液、空気、膿状分泌物を貯留する。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、ドレインチューブ等を接続するプラスチック製の排液バッグである。胸腔又は腹腔ドレーンに接続し、血液、空気、膿状分泌物を除去するために用いる。

#### 【使用方法等】

##### 使用方法

1. 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認し、無菌的に本品を取り出す。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### <保管方法>

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

##### <有効期間>

製品包装に表示。[自己認証（自社データ）による。]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社

外国製造業者：Merit Medical Systems, Inc.

国名：米国

