

メリット ファストブレイク

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

再使用禁止、再滅菌禁止

【使用上の注意】


<重要な基本的注意>

1. 本品を胆管カテーテルと併用しないこと。
2. 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れについて、定期的に確認すること。


【形状・構造及び原理等】

<形状>

メスコネクタ

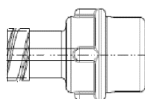

オスコネクタ

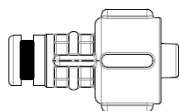

強度タイプ： 弱（橙）
中（緑）
強（黄）

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

直射日光、水ぬれ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。

<有効期間>

製品包装に表示。[自己認証（自社データ）による。]

【使用目的又は効果】

カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は
排液用カテーテルを身体に挿入したりするために用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メリットメディカル・ジャパン株式会社
外国製造業者：Merit Medical Systems, Inc. (米国)

【使用方法等】

<使用方法>

1. 本品のオスコネクタを時計回りに回転させながら
カテーテル※に取り付ける。
2. 他の器具※に本品のメスコネクタを時計回りに回転
させながら取り付ける。
3. 本品の両コネクタを接続する。
※カテーテル等の器具は本品には含まない。