

2022年 5月 1日作成（第1版）

一般医療機器 類別：医04 整形用品

一般医療機器

一般的名称：医療ガーゼ（JMDNコード：13700000）

販売名：VISCO Kスタット

【警告】

- ・本品は滅菌済の単回使用製品です。再滅菌又は再使用しないでください。
- ・使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

・形状

■使用前



■膨潤時



材質：PVA（ポリビニルアルコール）



滅菌包装

・原理

本品は吸収性の高いポリビニルアルコールスポンジが血液などの液体を吸収でき、滑らかな表面は除去する際に使用部位の付着による損傷リスクを減少させます。

・仕様

規格（長さ×幅×厚さ）	包装	
膨潤前：5cm × 1cm × 0.4cm （膨潤後：5cm × 1.5cm × Φ1.5cmの円筒型）	2袋/箱	2個/袋

* 最大15mlの血液を吸収


【使用目的又は効果】

・使用目的

外科手術時、又は手術後に血液等の液体の吸収除去を行う為のスポンジで、出血の抑制、液の吸収を目的とした吸収性のスポンジである。

・効能効果

滲出する血液、体液を迅速に吸収します。

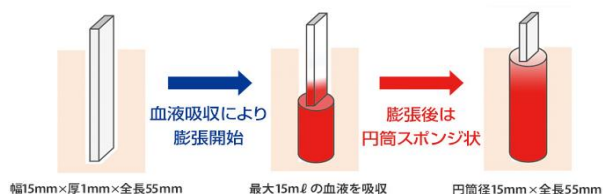

【使用方法等】

1. 本品を滅菌袋から清潔に取り出し、使用部位に挿入します。
2. 患者の患部の形状に合わせて、本品を整形できます。
3. 抜去する際は、鉗子を用いてゆっくりと抜去する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品は、滅菌済の製品であるため、開封は使用直前に包装が破損していないことの確認を行う。
- ・包装に破損がある場合は使用しないこと。
- ・本品は単回使用のため開封後に再使用及び再滅菌をしないこと。
- ・開封後未使用の製品は使用せずに破棄すること。
- ・使用前に使用期限(滅菌期限)を必ず確認すること。

2. 不具合・有害事象

- ・不具合：破損
- ・有害事象：本品の留置に伴う不快感。本品の除去による疼痛及び出血

【保管方法及び有効期間等】

・保管方法

直射日光、高温、多湿を避けて常温で保管すること。

・有効期限・使用期限

包装袋又は外箱に記載した使用期限表示を参照

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に製品に傷、破れ、変形がないことを確認
- ・本製品は、滅菌済であるため、使用前に包装材料に破れ、破損などの損傷がないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

株式会社メディカルブリッジ

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目3-32

Tel：06-6476-7145

[製造業者]

Somyoung Medics（韓国）