

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000

バイアルベントマイレクス


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

構造図

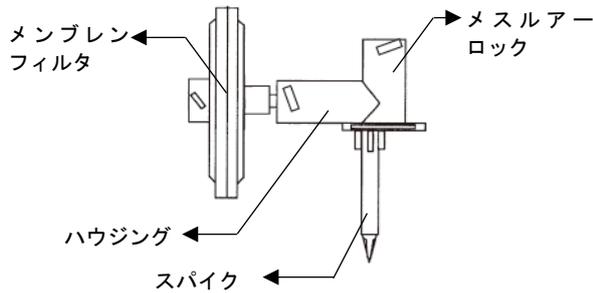

寸法

幅	40.5 mm
高さ	60 mm
ろ過面積	4.0 cm ²

本品はハウジング入口側のルーア継ぎ手を用いて注射筒に、スパイクを用いて薬剤バイアルに接続し、薬液を容器から他の薬液容器に移す、あるいは混和するために用いる。本品は、薬剤バイアル内外の差圧を調整するための孔径 0.22 μm の疎水性メンブレンフィルタを有し、薬剤等の飛散等を防止することができる。本品は、メンブレンフィルタ、ハウジングからなり、スパイク針を附属する。

部品名	原材料名
ハウジング	ポリ塩化ビニル
メンブレンフィルタ	ポリビニリデンフロライド
スパイク	ABS樹脂

【使用目的又は効果】

本品は薬液を容器から他の薬液容器に移す、あるいは混和するために用いる。


【使用方法等】

本品はエチレンオキサイド滅菌済みの単回使用の製品であるので、再使用・再滅菌できない。

手袋を着用し、無菌的に操作すること。

使用方法

- (1) 本品を無菌包装から取り出し、スパイク針の保護カバーを取り外す。

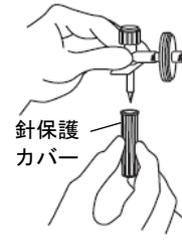

- (2) 本品のスパイク針を薬剤バイアルのゴム栓に突き刺す。この時、保護キャップは取り外さず被せたままにする。



- (3) 注射筒用フィルタを間に挟まずに使う場合、保護キャップを取り外し、入口側メスルーロックに注射筒を接続した後、スパイク針が上を向くように上下を返す。



注射筒用フィルタを間に挟んで使う場合、保護キャップを取り外し、入口側メスルーロックにあらかじめ注射筒用フィルタと接続してある注射筒を接続した後、スパイク針が上を向くように上下を返す。



- (4) 溶液を注射筒に吸引する。



- (5) スパイク針が下を向くように再び上下を返し、注射筒を取り外す。



【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 包装から取り出す際は、無菌的に操作すること。
- (2) 本品は 45 °C を超える温度で使用しないこと。
- (3) 最大使用圧力は、100 kPa である。
- (4) 薬液が本品フィルタ部やハウジングに流入することにより空気の出入りが阻害され薬剤バイアル内外の差圧の調整が出来なくなるため、必要な場合、新しい製品へ取り換えること。

その他の注意

- (1) 本品の使用中は、急激な圧の低下などの異常がないことを常に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光・紫外線・高温多湿を避けて、室温で保存すること。

有効期間

滅菌月より3年 [自己認証 (当社データ) による]
個別包装又は外箱の使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：メルク株式会社

外国製造業者：Merck Millipore Ltd. (アイルランド)