

類別:器24 知覚検査または運動機能検査用器具  
一般医療機器  
一般的名称:歩行分析計 (JMDNコード:35757000)

販売名 Footscan medical  
フットスキャン メディカル

**【禁忌・禁止】**

ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。

- ・ 歩行測定に適さないと診断された方の歩行禁止
- ・ 指定の使用条件を逸脱した設定・設置での利用禁止
- ・ ラテックス製品に対してアレルギーのある方は使用しないでください。

**【形状・構造及び原理等】**

《形状・構造》 画像 裏面

－プレートサイズ・重量

- 1 縦 578x横418x厚さ12mm 重量4. 2kg
- 2 縦1068x横418x厚さ12mm 重量8. 3kg
- 3 縦1605x横469x厚さ18mm 重量24kg
- 4 縦2096x横469x厚さ18mm 重量28. 8kg

－PC接続インターフェイス(USB2. 0)

**【使用目的又は効果】**

《使用目的》

本製品は、歩行や重心動揺の足底圧を測定する装置である。測定により足部の動作分析、それにとまう上体分析の参考資料として活用が可能である。また下肢の怪我リスクを算出し支援に利用できる。その他ジャンプ等の動作を測定することで動作分析を応用化させる事が可能である。

**【使用方法】**

収集データを保存するPCと測定プレートを設置し、測定プロトコルを選択する。基本は両足で立位の足圧を測定、その後任意の時間で連続測定する。歩行測定はプレートの少し外から歩き始めプレート上を通過する。歩行は普段の歩幅、速度で行う。測定完了後にアプリケーションの結果から項目ごとに分析できる。

**【使用上の注意】**

- ・ プレートを設置する場合は平らで滑らかな場所で使用する。
  - ・ 直射日光が当たる場所での使用はさける。
  - ・ 鋭くとがった物でたたかない。
  - ・ スパイクシューズなどでプレート上を歩かない。
  - ・ プレートを折り曲げない。
  - ・ PVCに有害な洗剤や消毒剤を使用しないでください。
- 詳細は取扱説明書を必ず参照すること。

**【保管方法及び有効期間】**

《保管方法》

- 1) 高温(40℃以下)、低温(+0℃以上)内で多湿や直射日光をさけ保管する。
- 2) 傾斜や振動などの加わらないところで保管する。



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

<製造販売業者>メディアマート株式会社

電話番号:03-3612-0278

<製造業者> MATERIALISE N.V. ベルギー

《形状》

プレート外観



サイズ 2 : 縦 1068x 横 418x 厚さ 18mm 重量 8.3 kg



PC 接続インターフェイス USB2.0

