

医 04 整形用品  
一般医療機器 34655000 医療用不織布


## 医療用不織布ガーゼ バンブス

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌を避けること
- 体内に留置しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

セルロース繊維（原料に竹100%）からなる不織布ガーゼ。  
このセルロースの親水性と吸水性により優れた保水性を有し、創部に湿潤環境を提供する。

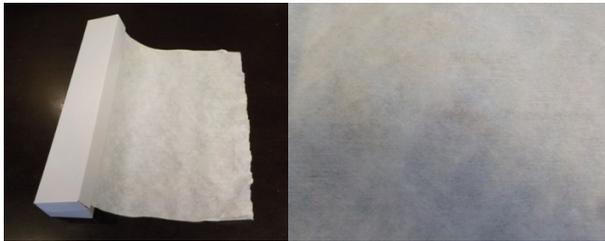

### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するための被覆・保護材。  
創傷部を被覆することにより浸出液等を吸収し、保護する。

### 【使用方法等】

使用者により適宜使用。  
本品は未滅菌のため用途に合わせて、適宜滅菌して使用すること。  
滅菌は、高圧蒸気滅菌又はEOG滅菌ができる。プラズマ滅菌は避けること。

### 【使用上の注意】

再使用禁止。  
体内に留置しないこと。

### 【保管方法及び有効期間】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。  
小児の手の届かないところに保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社メディ・フュージ  
大阪府大東市浜町8番22号  
電話番号(072)872-1861