

機械器具 65 歯科用充填器
*一般医療機器 歯科用充填器 「JMDN」 70680000

レジン筆積専用筆

【形状・構造及び原理等】

[形状]

1. 直型 (ストレートタイプ)



2. 曲型 (アングルタイプ)



[構造] ブラシ先端部、固定部及び柄部からなります。

[寸法] 柄部全長: 140±5mm

[種類] 直型: 5種類 (#2, #1, #0, #00, #000)

曲型: 5種類 (#2, #1, #0, #00, #000)

[原材料] ブラシ先端部 赤テンの毛

固定部 アルミニウム合金

柄部 木製

[原理] レジン系仮封材の液剤及び粉剤をブラシ先端部で化学的に重合させたものを、窩洞に充填します。

【使用目的又は効果】

レジン系仮封材の液剤に本ブラシ先端部を浸し、その後粉剤に接触させて混和させたものをそのまま窩洞に充填する。

【使用方法等】

- ①ダッペングラスにレジン系仮封材の粉剤を少量入れ、別のダッペングラスに液剤を適量入れます。
- ②ブラシ先端部を液に浸した後、筆先で球状になるように粉剤をつけます。この時、筆先がグラスに触れないようにして下さい。
- ③この混和物を適用部位に充填し、同様の操作を繰り返して、窩洞を充填します。

【使用上の注意】

[使用注意]

- ①患者毎にアルコール消毒を行うこと。
- ②使用後はブラシ先端部を市販のブラシ・クリーナーで清掃し、その後、流水でクリーナーを完全に洗い流した後、乾燥させること。
- ③レジン系仮封材の液剤及び市販のブラシ・クリーナーを本品の柄部に接触させた場合、柄部表面の塗料が溶け出すおそれがあるので注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①室温にて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者: 株式会社 茂久田商会

連絡先: <https://www.mokuda.co.jp>

製造業者: リライアンス社/アメリカ

Reliance Dental Mfg., LLC/USA