

歯科材料 8 歯科用石膏及び石膏製品
**一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 「JMDN」 34811000

エステティック マスク

【禁忌・禁止】

本材により発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、次の各材料及び付属品によりセットを構成します。

- ①ベース
- ②キャタリスト
- ③分離材
- ④注入用シリンジ
- ⑤スパチュラ
- ⑥練和紙

〔形 状〕

ベース	ペースト状
キャタリスト	ペースト状

〔原材料〕

ベース	ジメチルポリシロキサン ケイ酸 メチルヒドロジェンポリシロキサン
キャタリスト	ジメチルポリシロキサン ケイ酸

〔原 理〕

石膏にて作成した模型に対して、歯肉部分を石膏ではなく、本品の練和物と置き換え、歯肉と同じ色合いにすることにより義歯等補綴物が患者の口腔内と同じ感覚で調整出来ます。

*【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料をいう。

*【使用方法等】

- ①シリコン・パテ印象材により、調整前の作業模型の印象を採取します。
- ②模型上で、エステティックマスクに置き換える歯肉部分を切削します。
- ③マージントリミング後、ラウンドバー又は円錐バーを用いて、①で採取した印象に注入孔、反対側に排出孔を開けます。トリミングをした範囲が広い場合は、注入孔及び排出孔を数カ所開けてください。
- ④①により採取した複印象の内面全体に分離材をスプレー

し、30 秒乾燥させ、その後複印象を石膏模型の正しい位置に戻します。

- ⑤付属の練和紙に同量のベース及びキャタリストを採り、歯肉色になるまで約 30 秒間練和します。
- ⑥練和後、付属の注入用シリンジに入れ、注入孔に注入し、反対側の排出孔から余分な練和物が排出されるまで注入します。
- ⑦硬化後（約 8 ～ 10 分）、模型から複印象を取り外します。
- ⑧硬化したエステティックマスクを注意深く引き上げ、注入孔、排出孔に入り込んだ突起など余分な材料をメスかハサミで取り除きます。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

- ①使用後は必ず蓋をして保管すること。
- ②分離材（スプレー）は換気の良い場所で行うこと。
- ③分離材は専用のものを使用すること。
- ④シリンジ使用後は、次の使用に備えて清掃して、保管すること。

*【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ②本材に対し発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で直接本材に触れないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①直射日光を避け、10 ～ 25℃の冷暗所で保管すること
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本材は包装に記載の※有効期間までに使用すること。
〔記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。〕
※（例 ☒ 2017-07 は使用期限 2017 年 7 月を示す。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：デタックス社／ドイツ

Detax GmbH & Co. KG / Germany