

ノビリウム カット オフ ホイール

【形状・構造及び原理等】

〔形 状〕 外径 32mm φ ±1mm のホイール状で、中心部にマンドレル接続用の孔があいています。

厚さ別に 2 種類（Heavy：1.2mm、Thin：0.8mm）があります。

〔原材料〕 酸化アルミニウム、シリコーンゴム

〔原 理〕 歯科用マンドレルを取付、その後に歯科用ハンドピースに接続固定し、ハンドピースにより回転を与えることにより、ホイールも回転し、この回転により合金の切断に用います。

* 【使用目的又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いる技工用研削材をいう。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

* 【使用方法等】

- ① 歯科用マンドレルを中心の孔に取付固定します。
- ② 歯科用ハンドピースに接続固定します。
- ③ ハンドピースにより回転を与えてコバルトクロム合金を切断します。

【使用上の注意】

- ① マンドレルに装着後、ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンク部を確実に奥まで挿入して半チャックでな

いことを確認すること。

- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

- ③ 破折防止のため、無理な角度、過度の加圧での使用を避けること。

- ④ 本品を使用する際には目の損傷を防ぐために、保護メガネを使用すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

使用前・使用後は、破損、ひび、傷、変形等がないか確認すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：シーエムピー社／アメリカ

CMP Industries LLC / USA