

ノビリウム カット オフ ホイール

【形状・構造及び原理等】

〔形 状〕 外径 32mm $\phi \pm 1$ mm のホイール状で、中心部にマンドレル接続用の孔があいています。厚さ別に 2 種類（Heavy：1.2mm、Thin：0.8mm）があります。

〔原材料〕 酸化アルミニウム、シリコーンゴム

〔原 理〕 歯科用マンドレルを取付け、その後に歯科用ハンドピースに接続固定し、ハンドピースにより回転を与えることにより、ホイールも回転し、この回転により合金の切断に用います。

【使用目的又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いる技工用研削材をいう。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

【使用方法等】

- ① 歯科用マンドレルを中心の孔に取付け、固定します。
- ② 歯科用ハンドピースに接続固定します。
- ③ ハンドピースにより回転を与えてコバルトクロム合金を切断します。

【使用上の注意】

- ① マンドレルに装着後、ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンク部を確実に奥まで挿入して半チェックでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ③ 破折防止のため、無理な角度、過度の加圧での使用を避けること。
- ④ 本品を使用する際には目の損傷を防ぐために、保護メガネを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

使用前・使用後は、破損、ひび、傷、変形等がないか確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：https://www.mokuda.co.jp

製 造 業 者：シーエムピー社／アメリカ

CMP Industries LLC／USA