

歯科材料 8 歯科用石膏及び石膏製品

** 一般医療機器 歯科高温鑄造用埋没材 「JMDN」 70900020

リキッド ペイント オン

【形状・構造及び原理等】

[性状] 液状

[原材料] 珪酸ジルコニウム

石英粉末

酸化クロム

蒸留水

[原理] 本品をパターン等に薄く塗布することによりパターンの上に一層膜を作りエチルシリケート埋没材からパターンを物理的に保護します。

* 【使用目的又は効果】

無水ケイ酸、アルミナ、マグネシア、リン酸塩、コロイダルシリカ、エチルシリケート、石こう等を主成分とする鑄造用埋没材をいう。

* 【使用方法等】

- ① 容器の蓋を外し、へら等で容器の周囲にくっついている本材をこぼさないようにかき混ぜます。
- ② 蓋を閉じ、本材が液状になるまで数秒間力強く振って下さい。
- ③ 小筆を用い、ワックスパターン等に薄く塗布します。
- ④ ワックスパターン等の表面に薄く一層膜を作ります。そ

れ以外の余分なものは除去します。

- ⑤ 塗布後約7分間静置し、乾燥させます。
- ⑥ 通法により埋没します。
- ⑦ 本材を適用することにより、エチルシリケート埋没材よりワックスパターン等を保護し、滑沢な鑄造体が得られます。

【使用上の注意】

[使用注意]

- ① 使用しないときは蓋を閉じておくこと。
- ② 乾燥したときは、数滴の蒸留水を混ぜること。

* 【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように常温にて適切に保管・管理すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：シーエムビー社／アメリカ

CMP Industries LLC / USA