

歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品

\* 一般医療機器 歯科高温鑄造用埋没材 「JMDN」70900020

## リキッド ペイント オン

### 【形状・構造及び原理等】

[性状] 液状

[原材料] 珪酸ジルコニウム、石英粉末、酸化クロム、  
蒸留水

[原理] 本品をパターン等に薄く塗布することによりパ  
ターンの上に一層膜を作りエチルシリケート埋  
没材からパターンを物理的に保護します。

### 【使用目的又は効果】

無水ケイ酸、アルミナ、マグネシア、リン酸塩、コロイ  
ダルシリカ、エチルシリケート、石こう等を主成分とす  
る鑄造用埋没材をいう。

### 【使用方法等】

- ①容器の蓋を外し、へら等で容器の周囲にくっついてい  
る本材をこぼさないようにかき混ぜます。
- ②蓋を閉じ、本材が液状になるまで数秒間力強く振って  
下さい。
- ③小筆を用い、ワックスパターン等に薄く塗布します。
- ④ワックスパターン等の表面に薄く一層膜を作ります。  
それ以外の余分なものは除去します。
- ⑤塗布後約7分間静置し、乾燥させます。
- ⑥通法により埋没します。
- ⑦本材を適用することにより、エチルシリケート埋没材  
よりワックスパターン等を保護し、滑沢な鑄造体が得  
られます。

### 【使用上の注意】

[使用注意]

- ①使用しないときは蓋を閉じておくこと。

②乾燥したときは、数滴の蒸留水を混ぜること。

### 【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように、常温にて適切に保  
管・管理すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者: 株式会社 茂久田商会

連絡先: <https://www.mokuda.co.jp>

製造業者: シーエムピー社/アメリカ

CMP Industries LLC/USA