

**2015 年 10 月（第 4 版）

届出番号：28B1X00005000127

*2015 年 09 月（第 3 版）

歯科材料 6

歯科用印象材料のうち、歯科複模型用寒天印象材

** 一般医療機器

歯科複模型用寒天印象材

「JMDN」 70890000

オール パーパス ノビロイド

【形状・構造及び原理等】

〔性 状〕 薄茶色のゲル状

〔原材料〕 ゲル状寒天

濃グリセリン

チモール

〔原 理〕 本品を約 100℃に加熱することにより溶けてゾル状になり、約 20℃の水浴中で冷却することによりゲル状に戻ります。この性質を利用して複模型作成のための印象材として使用出来ます。

* 【使用目的又は効果】

寒天を主成分とする印象材で、主として複模型の作成に用いるものをいう。

* 【使用方法等】

- ①必要量の本品を容器に採り、攪拌しながら徐々に約 100℃に加熱し、むらなく溶かした後、蒸発により失った水分を補給してから良く攪拌します。
- ②フラスコの中に石膏模型を収め、溶けた本品を注入してフラスコを満たします。（注入するときの本品の温度は約 45℃以上であればよい。）
- ③フラスコの外側を約 20℃の水浴中で冷却します。

④冷却により本品が熔融状態からゲル状に戻ったことを確認してから、石膏模型を取り外し、別の石膏を流し込みます。これにより同じ外形の石膏模型が複製されます。

【使用上の注意】

- ①本品の使用の際は、火傷に注意すること。
- ②目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

* 【保管方法及び有効期間等】

- ①本品は、室温にて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊 急 連 絡 先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製 造 業 者 名：シーエムビー社／アメリカ

CMP Industries LLC / USA