

歯科材料 7 歯科用ワックス

**一般医療機器

歯科用キャスティングワックス

「JMDN」16189000

ホワイト キャスティングワックス No. 6

【形状・構造及び原理等】

[形状]



[原材料] パラフィンワックス

カルナウバろう

キャンデリラろう

他

[種類] タイプ II（ISO 1561）

[原理] 熱により溶けて湯道から流れ出、その流れ出た後の空洞に対して溶解した金属を注入して補綴物を作成します。

*【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスをいう。

*【使用方法等】

本品を加温し、軟化させたもので補綴物等の原型を作成します。

【使用上の注意】

- ①本材は可燃性のため、使用に際しては火傷に注意すること。
- ②直射日光があたる等、高温の場所に放置しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①冷暗所にて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材に記載の※有効期間までに使用すること。

[記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）による。]

※（例 2016 12 は有効期間 2016 年 12 月を示す。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：プリマ デンタル社／イギリス

Prima Dental Manufacturing / UK