

歯科材料 7 歯科用ワックス
*一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 「JMDN」 16189000

ホワイト キャスティングワックス No. 6

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔原材料〕 パラフィンワックス、カルナウバろう、
キャンデリラろう、他

〔種 類〕 タイプⅡ（ISO 1561）

〔原 理〕 熱により溶けて湯道から流れ出、その流れ出
た後の空洞に対して溶解した金属を注入して
補綴物を作成します。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製
用のキャスティングワックスをいう。

【使用方法等】

本品を加温し、軟化させたもので補綴物等の原型を作成
します。

【使用上の注意】

- ①本材は可燃性のため、使用に際しては火傷に注意する
こと。
- ②直射日光があたる等、高温の場所に放置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①冷暗所にて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理

すること。

〔有効期間〕

本材に記載の※有効期間までに使用すること。

〔記載の有効期間は、自己承認（輸入先製造業者データ）
による。〕

※（例 ※2016 12 は有効期間 2016 年 12 月を示す。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：<https://www.mokuda.co.jp>

製 造 業 者：プリマ デンタル社／イギリス

Prima Dental Group／UK