

歯科材料 9 歯科用研削材料

**一般医療機器 歯科用研磨器材 「JMDN」 70907000

ポリラピッド 研磨用器材

【形状・構造及び原理等】

[原材料]

レーズ用

①ブラシ部：豚毛、ステンレス鋼線等

②固定板：木、ステンレス等

ハンドピース用

①ブラシ部：豚毛、ステンレス鋼線等

②固定板：ステンレス等

③シャंक部：ステンレス、合金工具鋼等

[原理] 歯科用ハンドピース、又は歯科用電気レーズに取り

り付け固定し、回転を与えることによりブラシ部

も回転し、補綴物を研磨します。

*【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

*【使用方法等】

①通法に従い本品を歯科用ハンドピース、又は歯科用電気レーズのバフ用金具に取り付け固定します。

②回転を与えて補綴物等を研磨します。

【使用上の注意】

①歯科用ハンドピース又は歯科用電気レーズに装着し、適切に装着されていることを確認すること。

②使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。

③破折防止の為、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

④本品を使用する際には、目の損傷を防ぐ為に、保護メガネを使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

使用前・使用後は、破損、ひび、傷、変形がないことを確認すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：ポリラピッド社/ドイツ

Polirapid Dr. Montemerlo GmbH & Co., KG

/ Germany