

器具器械 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器のうち（電動式のものを除く）歯科用マンドレル

\*\* 一般医療機器 歯科用マンドレル 「JMDN」 35170000

## ジッペラー マンドレル

### 【形状・構造及び原理等】

[原材料] ステンレス鋼

[原理]

本品先端部に研磨器材を取り付け、歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨することが出来ます。

### \* 【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトをいう。

### \* 【使用方法等】

先端部に研磨器材を取り付け、歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨します。

### 【使用上の注意】

- ①ポイント、ディスク等を取り付けるときは、確実に取り付けること。
- ②ハンドピースに取り付けるときは、ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックで無いことを確認すること。

③使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。

### \* 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に関する事項】

[使用者による保守点検事項]

使用前・使用後は破損、ひび、傷、腐食等がないか確認して下さい。異常が認められた場合は使用しないこと。

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：ブィディダブリュ社／ドイツ

VDW GmbH / Germany