

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器

* 一般医療機器 歯科用マンドレル 「JMDN」 35170000

ジッペラー マンドレル

【形状・構造及び原理等】

〔原材料〕 ステンレス鋼

〔原 理〕

本品先端部に研磨器材を取り付け、歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨することが出来ます。

【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトをいう

【使用方法等】

先端部に研磨器材を取り付け、歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨します。

【使用上の注意】

- ①ポイント、ディスク等を取り付けるときは、確実に取り付けること。
- ②ハンドピースに取り付けるときは、ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックで無いことを確認すること。
- ③使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

〔使用者による保守点検事項〕

使用前・使用後は破損、ひび、傷、腐食等がないか確認して下さい。異常が認められた場合は使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：https://www.mokuda.co.jp

製 造 業 者：フィディダブリュ社／ドイツ

VDW GmbH／Germany