

器具器械 65 歯科用充填器

\*\* 一般医療機器

歯科用根管プラグ

「JMDN」41876000

## ジッペラー プラガー

### 【形状・構造及び原理等】

針部及び柄部からなり、針部の外径別に6種類があり、針部長さは25±1mmです。針部先端部は針状になっており、又、容易にサイズが判別できるよう柄部に着色を施しています。

種類及び外径寸法は次表の通りです。

(単位 mm)

種類	先端部外径	色
015	0.15 φ	白
020	0.20 φ	黄
025	0.25 φ	赤
030	0.30 φ	青
035	0.35 φ	緑
040	0.40 φ	黒

[原材料] 針部……ステンレス鋼

柄部……硬質プラスチック

[原理] 針部断面は円形で、針部先端の平らな部分により、柔らかくなったガッターパーチャポイントを根管内に垂直加圧により充填します。

### \*【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具をいう。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的としている。

### \*【使用方法等】

- ① 通法に従いガッターパーチャポイントを柔らかくします。
- ② 柔らかくなったガッターパーチャポイントを根管内に挿入します。
- ③ 本品の針部を加温し、ガッターパーチャポイントを垂直方向に加圧充填します。

### 【使用上の注意】

- ① 高压蒸気滅菌器にて滅菌する場合は、消毒液を洗い流し、十分乾燥させてから実施すること。乾燥が完全でない場合は、ハンドル部が破折することがある。
- ② 消毒液にはクロロホルムを使用しないこと。
- ③ 誤飲防止のため安全装置を使用すること。
- ④ 本品は未滅菌品であるため、使用に際しては必ず洗浄し、【保守・点検に係る事項】に記載する滅菌条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。

### \*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

[滅菌条件] 本品使用後は、水洗の後、超音波洗浄器、清掃液、消毒剤などにより付着物を完全に除去した後、十分に乾燥させ、下記に記載する条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行うこと。

滅菌方法：高压蒸気滅菌

滅菌条件：温度 132℃、時間 10分以上

[使用者による保守点検事項]

使用前・使用後は破損、ひび、傷、腐食等がないか確認すること。

異常が認められた場合は使用しないこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：ブィディダブリュ社/ドイツ

VDW GmbH / Germany