

アクリルマーベル

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系材料の研磨に使用する研磨器材です。

[原材料]

AM 専用パフ ①ホイール部：綿布製

②ステッチ部：綿糸製

綿糸ポイント ①ポイント部：綿糸製

②シャンク部：ステンレス鋼

アクリルマーベル：脂肪酸、ろう等

[原 理]

歯科用レーズ、又は歯科用ハンドピースにより回転を与え
補綴物を研磨します。

* 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

* 【使用方法等】

- ①ホイールは歯科用電気レーズのパフ用金具に、ポイントは歯科用ハンドピースに取り付け固定します。
- ②電気レーズ又はハンドピースにより回転を与え、アクリルマーベルを塗布します。
- ③補綴物等を研磨します。

【使用上の注意】

- ①ホイールをレーズに、又はポイントをハンドピースに装着した後、適切に装着されていることを確認すること。
- ②使用前に予備回転を行い、振れが無いか確認すること。
- ③無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ④本品を使用する際には、目の損傷を防ぐ為に、保護メガネを使用すること。また、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、防塵マスクを使用すること。

** 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

使用前・使用後は、破損、変形がないか確認すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：デンタル ベンチャーズ オブ アメリカ
カ社／アメリカ

Dental Ventures of America, Inc. ／ USA

ポリラピッド社／ドイツ

Polirapid Dr. Montemerlo GmbH & Co., KG
／ Germany