

器具器械 25 医療用鏡のうち、手術用顕微鏡
*一般医療機器 双眼ルーペ 「JMDN」 32692000

ハイネ レンズ単品

**【形状・構造及び原理等】

[形状]



- ① HR 双眼ルーペ
- ② HRP 双眼ルーペ
- ③ レンズ保護カバー（HR用）
- ④ レンズ保護カバー（HRP用）
- ⑤ 作業距離短縮レンズ

[原材料]

双眼ルーペ
レンズ：ガラス
レンズ枠：プラスチック

[原理]

本品を用いることにより作業野の拡大像が得られマイクロサージェリーなどの細かな外科処置を行うことができます。

*【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから

成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

*【使用方法等】

- ① 双眼ルーペをSフレーム（別売品）又はお使いの眼鏡に装着します。眼鏡に直接双眼ルーペを装着する場合は眼鏡取付用クリップをお使い下さい。
- ② 双眼ルーペ上部のネジを緩めます。
- ③ 規定の作業距離で立体物を見たとき、視界中央に物体が見えるように双眼ルーペを調節します。
- ④ 上部のネジを再度しっかり締め、双眼ルーペを正しい位置に固定します。

*【保管方法及び使用期間等】

- ① 保管にあたっては、ほこりのつかない場所に保すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ② 清掃は、専用のレンズ用クリーナー等で湿らせた布を用いて清拭すること。アルコール等の有機溶剤を使用する清拭は、絶対行なわないこと。また直接構成品やパーツを消毒剤に浸したり、吹き付けたりしないこと。

*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：ハイネ オプトテック社／ドイツ

Heine Optotechnik GmbH & Co.KG / Germany