

歯科材料9 歯科用研削材料

** 一般医療機器 歯科用研磨器材 「JMDN」 70907000

DVA研磨ペースト

【形状・構造及び原理等】

[原材料]

酸化アルミニウム、ダイヤモンド、ケイ酸アルミニウム、
他

[原理] 歯科用ハンドピース、又は歯科用電気レーズに取り
付け固定し、回転を与えることによりブラシ部
も回転し、補綴物を研磨します。

* 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材です。

* 【使用方法等】

- ①本品をブラシ、パフ、フェルトホイール等の研磨器材に
附着させる。この際、研磨器材を回転させながら附着さ
せます。
- ②本品を附着させた研磨器材を補綴物にあて、研磨を行な
ってください。

【使用上の注意】

- ①本品が目に入らないように注意すること。万一目に入っ
た場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を
受けること。
- ②本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避け
るため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク
などを使用し、粉塵を吸入しないこと。

③本品での研削、研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保
護めがね等を使用すること。

④研磨作業後は、石鹼をつけたブラシ等で十分に手指を洗
浄すること。

⑤本品の使用により、発疹などの過敏症状が現れた際は、
使用を中止し、速やかに医師の診断を受けること。

⑥本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある
方は使用しないこと。

⑦本品を使用しての口腔内研磨後は、必ず口腔内の洗浄を
行ない、唾液は飲み込まないようにして下さい。

* 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①高温若しくは多湿となる場所での保管は行わず、キャ
ップのあるものは必ずキャップを閉めて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す
ること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8248

FAX 078-303-2151

製造業者名：デンタル ベンチャーズ オブ アメリ
カ社／アメリカ

Dental Ventures of America, Inc. / USA