

DVA 研磨ペースト

【形状・構造及び原理等】

〔原材料〕

酸化アルミニウム、ダイヤモンド、
ケイ酸アルミニウム、他

〔原 理〕 歯科用ハンドピース、又は歯科用電気レーズに

取り付け固定し、回転を与えることによりブラ
シ部も回転し、補綴物を研磨します。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材です。

【使用方法等】

- ①本品をブラシ、パフ、フェルトホイール等の研磨器材に付着させる。この際、研磨器材を回転させながら付着させます。
- ②本品を付着させた研磨器材を補綴物にあて、研磨を行なってください。

【使用上の注意】

- ①本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ②本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③本品での研削、研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用すること。

④研磨作業後は、石鹸をつけたブラシ等で十分に手指を洗浄すること。

⑤本品の使用により、発疹などの過敏症状が現れた際は、使用を中止し、速やかに医師の診断を受けること。

⑥本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある方は使用しないこと。

⑦本品を使用しての口腔内研磨後は、必ず口腔内の洗浄を行ない、唾液は飲み込まないようにして下さい。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①高温若しくは多湿となる場所での保管は行わず、キャップのあるものは必ずキャップを閉めて保管すること。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先： <https://www.mokuda.co.jp>

製 造 業 者：デンタル ベンチャーズ オブ アメリ
カ社／アメリカ

Dental Ventures of America, Inc. ／USA