

器具器械 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器のうち（電動式のものを除く）、歯科用パー
一般医療機器 歯科用カーバイドバー 「JMDN」 16668000
（一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 「JMDN」 70903000）

デンチャー 咬合・フィット ファスト調整キット

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【原材料】

- 作業部：①タングステン・カーバイド(DLCコーティング)
②タングステン・カーバイド(DLCコーティング)
③タングステン・カーバイド(DLCコーティング)
④シリコーンゴム、研磨粒子
⑤シリコーンゴム、研磨粒子

シャンク部：ステンレス鋼

【原理】

歯科用ハンドピースに接続固定し、ハンドピースにより回転を与えることにより作業部が回転し、この回転により切削を行う。

【使用目的又は効果】

本キットはレジン床ならびに人工歯の形態修正および咬合調整に用いるキットであり、歯科用カーバイドバーならびに歯科用ゴム製研磨材からなる。歯科用ハンドピースに装着し回転させることにより、アクリルレジン、硬質レジンおよび同様の材料の研削ならびに研磨に用いることができる。

【使用方法等】

本キットは歯科用ハンドピースに接続固定して、レジン床ならびにレジン歯の形態修整および咬合調整に用いる。

【使用上の注意】

- ①ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ②使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

③破折防止のため、ソフトタッチ（フェザータッチ）で使用する。

④無理な角度、過度の加圧での使用は絶対にしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ひび、傷、変形等がないか確認すること。異常が認められた場合は使用しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8241

FAX 078-303-2151

製造業者名：ホフ リングレブ社／ドイツ

Hopf, Ringleb & Co., GmbH & CIE/
Germany

株式会社 茂久田商会