

器具器械 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 「JMDN」 35170000

ミニ丸ヘッド 長持自在 マンドレル

【形状・構造及び原理等】



〔寸 法〕	全長	45mm
	頭部径	2.5 ±0.02mm φ mm
	シャンク径	2.34±0.2mm φ

〔原材料〕 ステンレス鋼

〔原 理〕

本品頭部に研磨器材を取り付け、シャンク部を歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨することができます。

【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトをいう。

【使用方法等】

頭部に研磨器材を取り付け、シャンク部を歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨します。

【使用上の注意】

①ポイント、ディスク等を取り付けるときは、確実に取り付ける

こと。

②ハンドピースに取り付けるときは、ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックで無いことを確認すること。

③使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に関する事項】

〔使用者による保守点検事項〕

使用前・使用後は破損、ひび、傷、腐食等がないか確認して下さい。異常が認められた場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名：株式会社 茂久田商会

緊急連絡先：TEL 078-303-8241

FAX 078-303-2151

製造業者名：合同会社 WSPT ジャパン