

機械器具 49

医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器

歯科用マンドレル

「JMDN」35170000

## ミニ丸ヘッド 長持自在 マンドレル

### 【形状・構造及び原理等】



#### 〔寸 法〕

|       |              |
|-------|--------------|
| 全長    | 45mm         |
| 頭部径   | 2.5－0.02mm φ |
| シャンク径 | 2.34±0.2mm φ |

#### 〔原材料〕

ステンレス鋼

#### 〔原 理〕

本品頭部に研磨器材を取り付け、シャンク部を歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨することができます。

### 【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸のこ、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石、カップ等を保持するシャフトをいう。

### 【使用方法等】

頭部に研磨器材を取り付け、シャンク部を歯科用ハンドピースに接続固定し、回転を与えて補綴物等を研磨します。

### 【使用上の注意】

- ①ポイント、ディスク等を取り付けるときは、確実に取り付けること。
- ②ハンドピースに取り付けるときは、ハンドピースメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックで無いことを確認すること。
- ③使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用者による保守点検事項〕

使用前・使用後は破損、ひび、傷、腐食等がないか確認して下さい。異常が認められた場合は使用しないこと。

### \*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社 茂久田商会

連 絡 先：<https://www.mokuda.co.jp>

製 造 業 者：合同会社 WSPT ジャパン