

*2015年1月改訂(第2版) (新記載要領に基づく改訂)
2008年2月作成(第1版)

届出番号 27B2X00018000023

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿
JMDNコード 70975000
販売名: 仁丹メディケア滅菌パッドT

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

脱脂綿、ポリエチレンフィルム

製品	寸法
Mサイズ	40mm×65mm
Lサイズ	65mm×70mm
LLサイズ	75mm×100mm

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する。

【使用方法等】

- 1 傷口を水道水で洗浄します。汚れや異物を完全に除去してください。
- 2 清潔な手で袋から傷あて材を取り出し、パッド表面のシートははがさず、そのまま傷口にあててください。
- 3 傷あて材の上から、包帯やテープなどで固定してください。
- 4 出血や分泌物が多い時は、こまめに取り替えてください。

【使用上の注意】

- 1 定められた使い方を守ってください。
- 2 傷あて材に薬をつけて傷口にあてると、血液や分泌物を吸わないおそれがあります。
- 3 使用中、発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
- 4 傷あて材がぬれたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、こまめに取り替えてください。
- 5 1枚ずつ滅菌していますので、使用するまで個包装は開封しないようにし、開封後はすみやかに使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ① お子様の手の届かないところに保管してください。
- ② 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ないところに保管してください。

*2.有効期間

自己認証による(品質保持期限参照)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 森下仁丹株式会社
大阪市中央区玉造1丁目2番40号
お問合せ先 0120-181-109