

2018年10月作成（第1版）

届出番号 27B2X00018000040

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 医療用不織布
JMDNコード 34655000
仁丹滅菌パッドC

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

不織布、ポリエチレン
滅菌済医療機器

【使用目的又は効果】

創傷面の保護。

【使用方法等】

1. パッド表面のシートをはがさずに、そのまま傷口にあててください。
2. パッドの上から、包帯やテープなどで固定してください。

【使用上の注意】

1. 定められた使用方法を守ってください。
2. 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
3. パッド部が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
4. 本来の用途以外に使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は滅菌済みですので、個包装を破らないように保管し、個包装開封後はすみやかにご使用ください。
2. お子様の手の届かないところに保管してください。
3. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ないところに保管してください。
4. 有効期限：自己認証による（品質保持期限参照）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：森下仁丹株式会社
住 所：大阪府中央区玉造1丁目2番40号
電 話：0120-181-109

製造業者：江蘇卓見医療用品有限公司（中華人民共和国）