

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000

カールベルグ クラウンワックス

【形状・構造及び原理等】

【種類】*

本品には、以下の種類がある。

種 類	色 調	用 途
ストーンハード	グレー、ブルー、アイボリー	クラウン&ブリッジ の歯冠形成用
ハード	グレー、ブルー、レッド	
インナー	グリーン	鋳造用パターンの 内層用
サービカル	ブリリアントレッド	クラウン&ブリッジ の辺縁部用

【原理】

本品を高温に溶かし流動性を持たせ、支台歯に合わせて接着
・作製し、彫刻刀などを使用して歯冠部模型を最終形成する。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用
いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 作業部を加熱したワックスパチュラ等を用いて、本品
を適度に溶解させながらワックスアップを行い、クラウ
ン又はインレーの形状を作製する。
- (2) 彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させる。
- (3) 通法に従い、ワックスパターンの埋没、焼成、鋳造を行
う。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- (1) 本品は可燃性のため、使用の際、火傷に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】*

【保管方法】

- (1) 本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保
管すること。
- (2) 保管場所には、消火器具を備えること。

【使用期限】

容器又は表示ラベルに記載の使用期限までに使用すること。

〔自己認証 (外国製造業者データ) による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者： **株式会社モリタ**

電 話 番 号： 06-6380-2525

外国製造業者： カールベルグ Karl Berg GmbH

国 名： ドイツ

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口： 株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号： 0800-222-8020 (無料)

F a x 番 号： 0800-222-6480 (無料)

E - m a i l： e-customer@morita.com