


歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

クロモ波尔

【形状・構造及び原理等】

【種類】

本品には作業部の形状の違いにより、以下の形態がある。

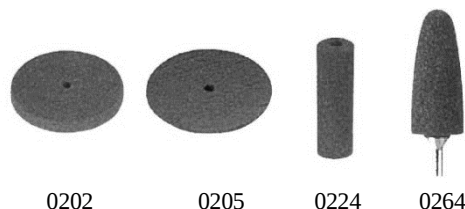

【原理】

ゴム基材に含有されたコランダム砥粒により研磨する。

【使用目的又は効果】

コバルトクロム合金の研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) シャンクレスは、マンドレルに装着する。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（製品の被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
- (4) 破折、曲がり等の原因となるため、2N を超える負荷を掛けないこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。〔呼吸による粉塵の吸入を防ぐ〕
- (2) 保護めがね等を使用すること。〔目の損傷を防ぐ〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：**株式会社モリタ**

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：エデンタ エタブリッセメント
Edenta Etablissement

国名：リヒテンシュタイン

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com