

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000


スターグロス C A

【形状・構造及び原理等】


【種類】

本品には作業部の形状の違いにより、以下の形態がある。また、粒度の違いにより、それぞれコース (粗)、ミディアム (中)、ファイン (細) の 3 種類がある。


(1) コース (ブルー)

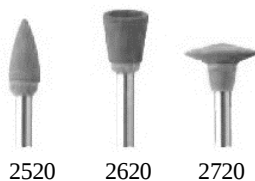

(2) ミディアム (ピンク)

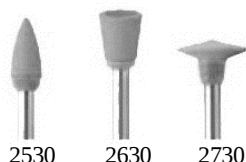

(3) ファイン (グレー)

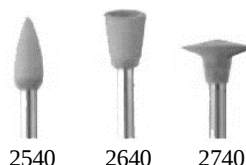

【原理】

ダイヤモンド砥粒により研磨する。

【使用目的又は効果】

セラミックスの研磨に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) 歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定 (製品の被包に記載) の回転数以下で使用する。
- (3) 予め口腔外で回転させて振れがないことを確認して使用する。
- (4) 十分な注水下 (50mL/分) で、発熱しない程度の圧で使用する。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。呼吸による粉塵の吸入を防ぐ
- (2) 保護メガネ等を使用すること。目の損傷を防ぐ

【保守・点検に係る事項】*

【消毒】

- (1) アルカリ性の消毒剤は使用しないこと。

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件 (日本薬局方による) : 115~118℃ 30 分間
121~124℃ 15 分間
126~129℃ 10 分間
- (2) 135℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 : 株式会社モリタ

電話番号 : 06-6380-2525

外国製造業者 : エデンタ エタブリッセメント

Edenta Etablissement

国名 : リヒテンシュタイン

【お問い合わせ先】

問合せ窓口 : 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号 : 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号 : 0800-222-6480 (無料)

E-mail : e-customer@morita.com