

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

F G アダプター

【形状・構造及び原理等】

【原理】

バネが FG バーの軸部を保持する。

【使用目的又は効果】

切削等に用いる FG バーを保持し、歯科技工用回転機器に接続するの用に用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) FG バーの軸部を本品のバネに取り付け固定する。
- (2) 歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
- (2) 指定（取り付けるバーの被包に記載）の回転数以下で使用する。
- (3) 使用前に、回転させて振れがないことを確認すること。
- (4) 破折、曲がり等の原因となるため、2N を超える負荷を掛けないこと。

【使用上の注意】*

【重要な基本的注意】

- (1) 局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。[呼吸による粉塵の吸入を防ぐ]
- (2) 保護めがね等を使用すること。[目の損傷を防ぐ]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者: **株式会社モリタ**

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: エデンタ エタブリシメント

Edenta Etablissement

国名: リヒテンシュタイン

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com