

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ 41876000
(歯科用根管スプレッダ 37678000)

S-コンデンサー

【禁忌・禁止】**

<適用対象(患者)>

- 本品の材質(ニッケルチタン合金)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

<使用方法>

- 本品の材質(ニッケルチタン合金)に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、作業部及びハンドル部からなる。



【サイズ・種類】

本品には、以下の種類がある。

種 類	色 (ハンドル部)	作業部径 (mm)	
		(A)	(B)
#40 NiTi/#80 SS	黒	0.40	0.80
#50 NiTi/#100 SS	ゴールド	0.50	1.00
#60 NiTi/#120 SS	青	0.60	1.20

【体に接触する部分の主な組成】

作業部 : ニッケルチタン合金 (A)、ステンレス鋼 (B)

ハンドル部 : アルミニウム合金

【原理】

作業部で根管に充填物を軸方向に充填、または側方に圧接する。

【使用目的又は効果】

充填物を根管内で軸方向に充填、又は側方に圧接するのに用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- (1) プラガー側の作業部で、充填物を根尖方向(軸方向)に押さえるようにして充填する。
- (2) スプレッダー側の作業部で、充填物を根管壁に圧接するようにして使用する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。[破折の原因となる。]

- (2) 作業部を火焰等であぶらないこと(耐熱温度は 190℃)。[作業部が変質、又は黒く酸化するおそれがある。また、超弾性の性質が失われる場合がある。]

【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- (1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者及び医療従事者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

【保守・点検に係る事項】**

[洗浄]

- (1) 使用後は、作業部に付着したガッタパーチャをアルコール等で除去すること。
- (2) 滅菌前に超音波洗浄を行うこと。
- (3) 洗浄後は、完全に水分を取り除くこと。

[消毒]

- (1) フェノールを含む消毒液を使用しないこと。

[滅菌]

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件(日本薬局方による): 115~118℃ 30 分間
121~124℃ 15 分間
126~129℃ 10 分間
- (2) 190℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】**

製造販売業者: **株式会社モリタ**

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: オブチュラ・スパルタン Obtura Spartan

国名: アメリカ合衆国

【お問い合わせ先】

問 合 せ 窓 口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電 話 番 号: 0800-222-8020 (無料)

F a x 番 号: 0800-222-6480 (無料)

E - m a i l: e-customer@morita.com