

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用前掛 38355000

クリングシールド


【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、1 枚の含鉛シートを覆う表布と裏布で構成され、縁取り材で包んで縫製した放射線防護用前掛である。頸部及び甲状腺を保護するための脱着式の衿を備えている場合がある。

【サイズ・種類】

種 類		標準寸法 A×B (mm)	標準 質量 (g)
①プロテクト オール (デンタル用)	大人用	ライトグレー ワインカラー	565×850 2,400
	子供用	ハッピーフェイス	
②デュアル (パノラマ用)	大人用	ライトグレー ワインカラー	570×795 4,400
	子供用	ハッピーフェイス	
③ネックカラー		ライトグレー ワインカラー	575×110 350

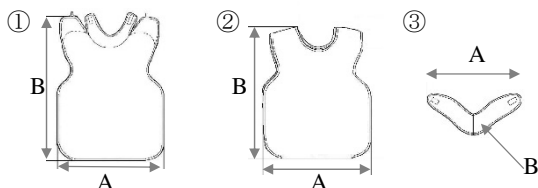

【原理】

放射線防護力のある含鉛シート及びそれを覆う耐液体性の外部カバーで、患者、術者、又は他の人員の体の一部を覆うことにより、放射線被曝から保護する。

【使用目的又は効果】

患者、術者、又は他の人員の体の一部を歯科における放射線被曝から保護するために用いる。

【使用方法等】*

【使用方法】

プロテクトオール（デンタル用）

- (1) 装着用のマジックテープを患者の頸部でしっかり固定し、身体前面を適切に覆う。

デュアル（パノラマ用）

- (1) 装着用のマジックテープを患者の肩でしっかり固定し、身体前後面を適切に覆う。

ネックカラー

- (1) マジックテープの固定位置を調節して、頸部及び甲状腺部を適切に覆う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- (1) 一次放射線（直接線）の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。
- (2) 落下等による衝撃を加えないこと。[内部の含鉛シートが破損するおそれがある]
- (3) X線防護材に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。

- (4) X線防護材が強く折り曲げられると、損傷する原因となるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】*

【保管の条件】

- (1) 折り曲げた状態や鋭利な部分に掛けた状態で保管しないこと。[本品の含鉛シートは鉛含有量が高く、部分的に荷重がかかると破損の原因となる]
- (2) 高温になる場所に置いたり、高熱にさらさないこと。[表面プリントが剥がれる原因となる]
- (3) ハンガー、スタンド等を使用して保管すること。

【保守・点検に係る事項】*

【洗浄】

- (1) 石鹼と水、又はビニールに使用可能な洗剤（中性洗剤等）を用いて、染み抜き等の要領で洗浄すること。
- (2) 水洗いはしないこと。

【消毒】

- (1) ビニールに使用可能な消毒剤のみを使用すること。
- (2) 子供用にはアルコールを使用しないこと。[アルコールにより表面プリントが剥がれる場合がある]
- (3) フェノール系の消毒剤は使用しないこと。

【使用者による保守点検事項】

- (1) 日常の始業、終業時に目視、触覚等による点検を行うこと。X線防護材に損傷が発生しているおそれがあると判断した場合は、使用を中止してX線透視又は透過写真撮影による検査を行うこと。
- (2) 本品を定期的にレントゲン撮影し、損傷が発生していないか確認すること。[目視確認できない損傷により、X線遮へい性能が発揮できない恐れがある]

【廃棄】

本品は鉛を使用しているので、廃棄の際には産業廃棄物処理業者に依頼すること。（特別管理産業廃棄物）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：パルメロヘルスケアエルエルシー

Palmero Healthcare LLC

国名：アメリカ合衆国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020（無料）

Fax 番号：0800-222-6480（無料）

E-mail：e-customer@morita.com