

機械器具 58 整形用機械器具
 一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

ヴァリオベース用リーマー

【形状・構造及び原理等】 **/*

【形状・寸法】

本品は、ヴァリオベース用リーマー (①)、ヴァリオベース用リーマーガイドピン (②)、ヴァリオマルチ用リーマーガイドピン (③) で構成されている。

形状及びサイズの違いにより以下の種類があり、①は、ヴァリオアバットメントの直径にそれぞれ対応している。

(単位: mm)

形状	種類	全長	a	b
① 	3.5-4.0 用	16.0	6.0	
	4.5-6.0 用		8.0	
② 	3.5 用	12.5	1.4	2.5
	4.0 用		1.6	2.5
	4.5-6.0 用		1.6	3.5
③ 		15.0	1.4	2.5

【原理】

本品を回転させて、バリ等を除去する。

【使用目的又は効果】 **/*

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】 **/*

【使用方法】

ヴァリオアバットメントに使用する場合

- (1) 使用するアバットメントの直径に対応したヴァリオベース用リーマー (①) にヴァリオベース用リーマーガイドピン (②) を接続する。
- (2) マイクロスコープ等を使用して注意深く観察しながら、ヴァリオアバットメントの下部 (メタルベース部分) にヴァリオベース用リーマーガイドピン (②) を差し込み、ヴァリオベース用リーマー (①) を回転させて、バリ等を除去する。

ヴァリオマルチゴールドキャップに使用する場合

- (1) ヴァリオベース用リーマー (①) 3.5-4.0 用にヴァリオマルチ用リーマーガイドピン (③) を接続する。
- (2) マイクロスコープ等を使用して注意深く観察しながら、ヴァリオマルチゴールドキャップ下部 (メタルベース部分) にヴァリオマルチ用リーマーガイドピン (③) を差し込み、ヴァリオベース用リーマー (①) を回転させて、バリ等を除去する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **株式会社モリタ**

電話番号: 06-6380-2525

外国製造業者: トーメン メディカル AG
 Thommen Medical AG

国名: スイス

【お問い合わせ先】

問合せ窓口: 株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号: 0800-222-8020 (無料)

Fax 番号: 0800-222-6480 (無料)

E-mail: e-customer@morita.com